

DILUYENTE GLOBULOS ROJOS



Consultar instrucciones de uso en www.biopack.com.ar

- REF** N° de catálogo: 2000180200
- IVD** Reactivo de Diagnostico para Uso in Vitro

Diluyentes para Glóbulos Rojos Para Recuento Manual

Aplicaciones:

El diluyente de globulos rojos es una solución utilizada en el recuento manual de globulos rojos en muestras de sangre mediante el uso de microscopio y hemocitómetro (cámara de Neubauer)

Modo de Uso:

1. Diluir la muestra de sangre 1:200 con la solución diluyente y dejar reposar a temperatura ambiente 10 (diez) minutos.
2. Homogenizar y cargar la cámara por capilaridad, dejando en reposo 15 (quince) minutos en ambiente húmedo.
3. Contar los Glóbulos Rojos en 5 (cinco) grupos de 16 (dieciséis) cuadrados.
4. Multiplicar los elementos contados por 10.000 para obtener el número de Glóbulos Rojos x mm³.

Nota: conservar el producto a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C. Una vez abierto, conservar en refrigerador entre 2°C y 8°C. Usar a temperatura ambiente.

- REF** Número de catálogo
- IVD** Reactivo de Uso in Vitro
-  Elaborador
-  Consultar instrucciones de uso
-  Contiene suficientes para <n> pruebas

 Elaborado por:
SISTEMAS ANALITICOS S.A.

**Sistemas
Analíticos** Ruta Nacional 9 km 105,5.
(2800) Zarate, Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina.

Director técnico: Marcelo L. Palacios, Farmacéutico M.N. 12407.

Reactivo de Diagnostico de Uso in Vitro.
Producto autorizado por ANMAT, certificado PM 1132-17.
Uso profesional exclusivo