

# DILUYENTES PARA PLAQUETAS

## Para Recuento Manual



Consultar instrucciones de uso en [www.biopack.com.ar](http://www.biopack.com.ar)

**REF** N° de catálogo: 2000180300

**IVD** Reactivo de Diagnostico para Uso in Vitro

### Aplicaciones:

El diluyente de plaquetas es una solución utilizada en el recuento manual de plaquetas en muestras de sangre mediante el uso de microscopio y hemocitómetro (cámara de Neubauer)

### Principio:

El diluyente de plaquetas para recuento manual, tiene por función principal lisar los eritrocitos (glóbulos rojos) y evitar la agregación plaquetaria, permitiendo una visualización clara de las mismas.

### Instrucciones de Uso:

1. Diluir la muestra de sangre 1:200 con la solución diluyente y dejar reposar a temperatura ambiente 10 (diez) minutos.
2. Homogeneizar y cargar la cámara por capilaridad, dejando en reposo 15 (quince) minutos en ambiente húmedo.
3. Contar las plaquetas en 5 (cinco) grupos de 16 (dieciséis) cuadrados.
4. Multiplicar los elementos contados por 1000 para obtener el número de plaquetas x mm³.

### Nota:

Conservar el producto a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C. Una vez abierto, conservar en refrigerador entre 2°C y 8°C. Usar a temperatura ambiente.

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| <b>REF</b> | Número de catálogo                    |
| <b>IVD</b> | Reactivo de Uso in Vitro              |
|            | Elaborador                            |
|            | Consultar instrucciones de uso        |
|            | Contiene suficientes para <n> pruebas |



Elaborado por:  
**SISTEMAS ANALITICOS S.A.**

**Sistemas**  
**Analíticos**

Ruta Nacional 9 km 105,5.  
(2800) Zarate, Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina.

**Director técnico:** Marcelo L. Palacios, Farmacéutico M.N. 12407.

Reactivo de Diagnostico de Uso in Vitro.  
Producto autorizado por ANMAT, certificado PM 1132-17.  
Uso profesional exclusivo