

REF N° de catálogo: 2000942200

IVD Reactivo de Diagnostico para Uso in Vitro

Uso previsto

Descalcificante de uso histológico, de aplicación general para piezas de tejido óseo completas, semicompletas o biopsias. Solución de descalcificación a base de un ácido suave (Acido Fórmico). Es compatible con la mayoría de los fijadores y con todos los procedimientos de tinción Hematoxilina y Eosina, y tinciones especiales. Es de acción rápida y su uso controlado previene el deterioro de determinantes antigénicos en las muestras tratadas.

Principio

Dentro de la variedad de tejidos que se procesan para estudio histológico e histopatológico se encuentran las muestras de tejido óseo. Este tipo de tejidos contienen calcio en su composición por lo que requieren descalcificación previa, para poder luego realizar el proceso de inclusión y su correspondiente preparación histológica. Las sales contenidas en el tejido óseo se vuelven solubles en contacto con soluciones con un pH de entre 0,5 y 4,5.

Procedencia de muestras

Se recomienda que la recolección de muestras se realice de acuerdo con las guías y estándares locales de procedimientos de laboratorios. Todos los derivados sanguíneos o de muestras de tejidos deben considerarse potencialmente infecciosos. Los manuales de procedimientos histológicos y citológicos estándar proporcionan todos los detalles necesarios para la recolección, manipulación y almacenaje de las mismas.

Reactivos y presentación

Histodecal - Botella 1000 mL (Cat. 2000942208)

Preparación del reactivo

Reactivo listo para usar. Este producto no requiere dilución y/o preparación previa.

Preparación de muestras

Fijación: Las muestras de tejido a decalcificar deben de estar fijadas con Formol 10% Buffer previamente. De ser una pieza de gran tamaño, se recomienda seleccionar y recortar en bloques / fragmentos de menor tamaño para lograr una óptima penetración, ya sea del fijador como del descalcificante.

Diagnóstico

El diagnostico de muestras debe ser realizados solamente por el profesional habilitado o personal autorizado. Deberán realizarse ensayos previos a la aplicación del producto. Cada aplicación deberá incluir muestras de control para descartar resultados erróneos. El microscopio usado deberá corresponder a los requisitos de un laboratorio de diagnóstico médico.

Procedimiento

Paso	Método / Reactivo	Técnica / Tiempo
1	Fijación / Formol 10 % buffer (*1)	Inmersión/24 a 72 horas
2	Lavado / Agua corriente	Inmersión/10 minutos
3	Descalcificación / HISTODECAL (*1)	Inmersión/ Ver Notas Técnicas (*2)
4	Lavado / Agua corriente	Inmersión/10 minutos
5	Deshidratación / Aclarado / Inclusión en parafina	Inmersión/ Ver Notas Técnicas (*3)

Notas técnicas

(*1) - El Volumen de Fijador y de Histodecal debe ser entre 15 y 20 veces el volumen de la muestra a procesar.
(*2) - El tiempo estimado para decalcificar una muestra ósea de 1,0 x 1,0 x 0,5 cm es de 8 horas. dependiendo de la densidad y/o el tipo de muestra. De ser necesario extienda este tiempo, renovando la solución de Histodecal. Evite dejar las muestras en Histodecal durante la noche o largos periodos de tiempo. De ser necesario extender la descalcificación por más tiempo, lave las muestras en agua corriente durante 5 minutos, luego déjelas en formol hasta poder retomar con la descalcificación (desde paso 2).
(*3) - Proceder con la deshidratación progresiva, el aclarado y la inclusión en parafina, según procedimientos de rutina.

Resultados

Muestras de tejido óseo, listas para proceso de deshidratación, aclarado e inclusión en parafina.

Precauciones

Se deben seguir las precauciones habituales ejercidas en el manejo de reactivos de laboratorio. Referirse a la Hoja de Seguridad del producto para obtener información sobre riesgo, peligro o medidas de seguridad.

Solamente para uso profesional:

El uso y aplicación de este tipo de reactivos debe ser realizado por personal especializado. El usuario deberá cumplir las directivas locales sobre seguridad en el trabajo y aseguramiento de la calidad.

Protección contra infecciones:

El profesional a cargo del uso o aplicación deberá contar con equipamiento de protección eficaz contra infecciones de acuerdo con las directivas de trabajo establecidas en laboratorios asistenciales o de investigación.

Indicaciones para la eliminación de residuos

Las soluciones usadas y las soluciones caducas deben eliminarse como desecho peligroso, cumpliendo con las regulaciones locales, estatales, provinciales o nacionales acerca del manejo de este tipo de residuos. El envase del producto debe ser eliminado de acuerdo con las directivas vigentes de eliminación de residuos.

Clasificación de sustancias peligrosas:

Tener en cuenta la clasificación de sustancias peligrosas en la etiqueta y las indicaciones en la ficha de datos de seguridad.

Estabilidad y almacenamiento:

Almacenar el reactivo a temperatura ambiente (entre 15°C a 30°C) y protegido de la luz. La solución es estable hasta la fecha de vencimiento que se declara en la etiqueta.

Información para el consumidor

El producto está garantizado por el fabricante hasta su fecha de vencimiento si se lo transporta y almacena en las condiciones prescriptas. Ante cualquier consulta, el fabricante puede ser contactado personalmente, por email o por teléfono o ingresando en www.biopack.com.ar (solapa de contacto).
Todos nuestros productos cuentan con su correspondiente ficha técnica y de seguridad, disponibles en forma on line: <https://www.biopack.com.ar>

Referencias

- 1. Theory and Practice of Histotechnology (2nd Edition): Dezna Sheehan, Barbara Hrapchak, Battle Press/Columbus Richland
- 2. Theory and Practice of Histological Techniques, John D Bancroft and Marilyn Gamble, 6th Edition
- 3. Laboratorio de Anatomía Patológica", autor: Raimundo García del Moral .
- 4. "Laboratory methods in histotechnology", Armed Forces Institute of Pathology (U.S.)

Consultar instrucciones de uso en www.biopack.com.ar

-  Número de catálogo
-  Reactivo de Uso in Vitro
-  Elaborador
-  Consultar instrucciones de uso
-  Contiene suficientes para <n> pruebas

 Elaborado por:
SISTEMAS ANALITICOS S.A.

Sistemas Analíticos Ruta Nacional 9 km 105,5.
(2800) Zarate, Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina.

Director técnico: Marcelo L. Palacios, Farmacéutico M.N. 12407.

Reactivo de Diagnostico de Uso in Vitro.
Producto autorizado por ANMAT, certificado PM 1132-15
Uso profesional exclusivo